

EstheShot

義歯床用熱可塑性レジン

エステショット

従来の義歯で使用していた金属性のクラスプを使用せず、義歯床と同じ素材で製作できるので、審美性に優れています。また即時重合レジンと接着するため、簡単にチェアサイドでの修復が可能になりました。



エステショットの特長

- 新素材(ポリエチレンテレフタレート共重合体)
- リライニングや補修が出来る常温重合型レジンとの良好な接着性。
- 安心して使い続けられるように残留モノマーや溶出物を低減。
- 審美性を損ないにくい低吸水性。
- 色々な義歯に使える適度な粘り強さ。
- フィット感を高める適合性 (◆金属床との併用が可能です。金属レストを付与してください。)

リベース

- 直接法でのリベースが可能です。(◆加熱重合タイプのリベースは出来ません。)
- 70℃を超える温度で変形・変色を起こす可能性がありますので、重合促進の際は70℃を超えないように注意してください。

洗浄について

- 義歯は定期的に洗浄を行って下さい。(毎日の洗浄をお勧めします。)
- 歯ブラシを使用する場合は、柔らかい歯ブラシで、歯磨き粉を付けずに洗浄してください。
- 超音波洗浄器で洗浄する場合は、水温が高温にならないように注意してください。
- 推奨する義歯洗浄剤 歯科医院用 …… フィジオクリーン プロ※
患者様用 …… フィジオクリーン キラリ錠剤※

※(株)ニッシン製

お問い合わせ

技工所名を入力して下さい。

住所・電話番号等を入力して下さい。