

サーモストップ

金属床義歯の修理でろう着する際、
レジン部分に炎（熱）を遮断する
目的として用います。

140g 標準価格 ¥4,000



※ペースト状です。



スパチュラなどですくい取り、
炎（熱）を遮断したい箇所に
サーモストップを塗布します。
（厚みは5ミリ以上）。



炎（熱）が当たるとサーモストップは白くなり、ヒビが入りますが内部への熱は遮断されます。



炎（熱）が当たったレジン部分は溶けていますが、サーモストップを塗布した部分は溶けません。