

様 年 月 日

ノンクラスプデンチャーをご使用になれる患者さんへ

取扱いのご注意

長くキレイにご使用頂くために、
毎日の洗浄をお薦めします。



01 洗浄について

熱湯による洗浄や煮沸消毒は変形の原因になります。
手で触れられない温度での洗浄はしないでください。

※食事の際、熱いものを飲食しても変形しません。
従来の入れ歯よりも傷がつきやすいので、歯磨き粉を使用しないでください。またブラシを使用される際はやわらかいブラシをご使用ください。

入れ歯洗浄剤は、市販の弱アルカリ性・中性・酸性のものをご使用ください。

※PH 1 2以上の強アルカリ性入れ歯洗浄剤は使用しないでください。ヒビが入る原因になります。

入れ歯の表面が荒れるので、**アルコール系**入れ歯洗浄剤は使用しないでください。

入れ歯洗浄剤
フィジオクリーン キラリ 錠剤
30包入 (3gX30)

入れ歯材料メーカーが考えた
入れ歯に優しい洗浄剤。

おすすめ

中性



※フィジオクリーンキラリは一般の薬局・スーパーではお求めになれません。
診療された歯科医院でお買い求めください。

02 お取扱い方法について

従来の入れ歯に比べると、弾性があり割れにくい入れ歯ですが、乱暴な扱いを繰り返し行くと、変形したり割れることがあります。大切に扱ってください。

03 メンテナンスについて

定期的に検診を受けてください。

様 年 月 日

ノンクラスプデンチャーをご使用になれる患者さんへ

取扱いのご注意

長くキレイにご使用頂くために、
毎日の洗浄をお薦めします。



01 洗浄について

熱湯による洗浄や煮沸消毒は変形の原因になります。
手で触れられない温度での洗浄はしないでください。

※食事の際、熱いものを飲食しても変形しません。
従来の入れ歯よりも傷がつきやすいので、歯磨き粉を使用しないでください。またブラシを使用される際はやわらかいブラシをご使用ください。

入れ歯洗浄剤は、市販の弱アルカリ性・中性・酸性のものをご使用ください。

※PH 1 2以上の強アルカリ性入れ歯洗浄剤は使用しないでください。ヒビが入る原因になります。

入れ歯の表面が荒れるので、**アルコール系**入れ歯洗浄剤は使用しないでください。

入れ歯洗浄剤
フィジオクリーン キラリ 錠剤
30包入 (3gX30)

入れ歯材料メーカーが考えた
入れ歯に優しい洗浄剤。

おすすめ

中性



※フィジオクリーンキラリは一般の薬局・スーパーではお求めになれません。
診療された歯科医院でお買い求めください。

02 お取扱い方法について

従来の入れ歯に比べると、弾性があり割れにくい入れ歯ですが、乱暴な扱いを繰り返し行くと、変形したり割れることがあります。大切に扱ってください。

03 メンテナンスについて

定期的に検診を受けてください。